

Customer: AUDINELL

Ref manual : 4 PD-03_A05

Open format : Width 150 x Height 140

Closed format : Width 75 x Height 140

Pages: 4

Brand: AUDINELL

Date: 19/12/2022

Software used: In-Design CC 2023

COVER

Print type: Offset

Print media: Offset White paper 70 gr

Lamination: none

Protective varnish: none

Colors used:



Cyan



Magenta



Yellow



Black

INSIDE PAGES

Print type: Offset

Print media: Offset White paper 70 gr

Protective varnish: none

Colors used:



Cyan



Magenta




Yellow




Black

Open format

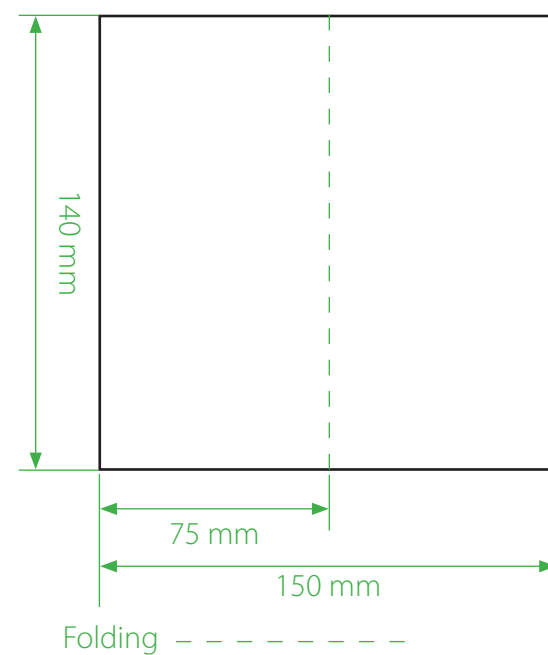

Closed format

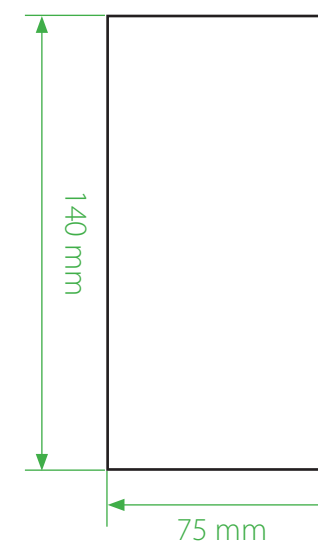

Garantie

PerfectDry wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 24 Monaten garantiert. Bei Geräteausfall wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker. Für jeden Service-Einsatz des Kundendienstes während der Garantiezeit muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden. Diese Garantie gilt nicht bei Betriebsstörungen bei einem Unfall oder Zwischenfall oder einem gleichartigen Schaden, bei Eindringen von Flüssigkeit, einer Nachlässigkeit, einem unsachgemäßen Gebrauch, einer Demontage, einem Mangel an Wartung seitens des Benutzers. Ferner gilt die Garantie nicht bei Betriebsausfall aufgrund von Blitzschlag oder anderen Spannungsschwankungen der Stromversorgung. Vorsorglich empfehlen wir, den Trockner PerfectDry bei Gewitter vom Stromnetz zu trennen.

Angaben zum Gerät

Bedeutung der Abkürzungen:

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte.	
Siehe Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung	
Hersteller	Herstellungsdatum
SN Seriennummer	MD Medizinprodukt
REF Katalognummer	5V-0.4A Gleichstrom
LOT Nummer der Charge	Benutzung im Innenbereich
Das Produkt besteht aus ABS mit Recycling-Code 7	Hinweise zur Mülltrennung
ENTSORGUNG - Altgeräte sind umweltgerecht zu entsorgen. Altgeräte enthalten recyclingfähige Materialien, die verwertet werden müssen. Altgeräte über die geeigneten Sammelsysteme entsorgen.	

Technische Daten

Funktionen

Außenabmessungen (LxHxT): 155 x 40 x 70 mm	[-20 °C; 65 °C]
Innenabmessungen (LxHxT): 148 x 30 x 64 mm	Betriebsbedingungen: [12 °C; 40 °C]
Gewicht (g): 126 g	Trocknungstemperatur: 40 °C
Max. Leistung: 2,5 W	Zyklusdauer: 2:15
Leistung im Standby-Betrieb: < 0.04 W	Netzadaptor
Lager-/Transportbedingungen:	Eingang: 100-240 Vac / 50-60 Hz
	Ausgang: 5 Vdc / 1 A
	Anschluss: USB-Kabel - Micro-USB



Ziehen Sie zum Schutz der Umwelt den Stecker Ihres PerfectDry, sobald das Hörgerät getrocknet ist!

Wenden Sie sich bei Problemen an einen Hörgeräteakustiker. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit der Vorrichtung ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Benutzer ansässig ist, zu melden.



PerfectDry


Intensiventfeuchtung aller
Arten von Hörgeräten

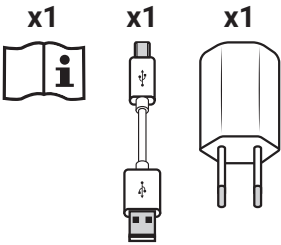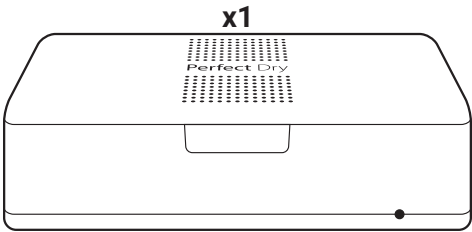


MC Développement - Zac les portes de l'aéroport - 178 rue Nègue-Cat - 34 130 Manguio - FRANCE | 19/12/2022 | 4 PD-03_A05

1 Den PerfectDry anschließen. Die Anzeige leuchtet kurz auf, um anzuzeigen, dass das Gerät angeschaltet ist.

2 Reinigen Sie Ihre Hörsysteme mit einem dafür vorgesehenen Feuchttuch, um überschüssigen Schmutz zu beseitigen. Öffnen Sie anschließend das Batteriefach Ihrer Hörsysteme (die Batterien können beim Trockenvorgang in den Hörsystemen bleiben). Legen Sie die Hörsysteme in das Trockenetui PerfectDry. Schließen Sie den Deckel.

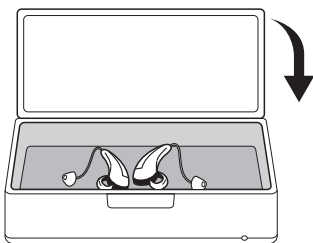

3 Betätigen Sie den Knopf und starten Sie den Zyklus (2 1/4 Stunden). PerfectDry stoppt automatisch am Ende des Zyklus (die Anzeige erlischt). Der Wartungszyklus kann jederzeit mit Druck auf den entsprechenden Knopf unterbrochen werden.

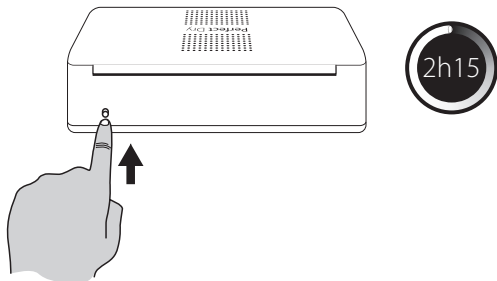

Beschreibung

PerfectDry ist ein medizinisches System zur optimale Entfeuchtung aller Arten von Hörgeräten. Die Trocknung wird mittels eines Warmluftstroms durch natürliche Konvektion erzielt.

Die regelmäßige Verwendung von PerfectDry beschädigt die Hörsysteme nicht (weder die Komponenten noch die Kunststoffe).

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres PerfectDry sorgfältig diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendungen auf: Eine unsachgemäße Verwendung befreit den Hersteller von jeglicher Haftung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Jeder Eingriff, der nicht die Reinigung und die übliche Wartung durch den Kunden betrifft, muss vom Kundendienst des Herstellers oder einen zugelassenen Fachmann vorgenommen werden. Das Gerät PerfectDry, das Stromkabel bzw. die Buchse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Falls das Stromkabel oder die Buchse beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht und tauschen Sie es unverzüglich aus. Ersetzen Sie Ihren Netzadapter durch ein Originalgerät. Verwenden Sie zur Pflege Ihres PerfectDry Trockenetuis keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller kann für Schäden durch eine unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung nicht haftbar gemacht werden.

Hinweise zur Pflege des Produkts

Mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde Produkte, um PerfectDry zu reinigen. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten ins Gerät.

Verordnung über Medizinprodukte

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.